



TRANSACTOR  
SECURITY

## Szybkie testy do wykrywania wirusa SARS-CoV-2



VivaDiag SARS-CoV-2 igM/IgG to szybki test diagnostyczny do wykrywania przeciwciał IgM oraz IgG SARS-CoV-2 w ludzkiej krwi (z opuszka palca / z żyły), surowicy i osoczu.


VivaDiag jest testem medycznym przeznaczonym do profesjonalnego użycia przez specjalistów. Testy posiadają certyfikat CE.

- Dokładność testu (czas infekcji 4–10 dni, IgM i IgG): **94,6%**
- Dokładność testu (czas infekcji 11–24 dni, IgM i IgG): **99,3%**
- Dokładność całkowita: **95.1%**




➤ Specyfikacja:


<b>Nazwa produktu</b>	VivaDiag™ SARS-CoV-2 IgM/IgG Rapid Test
<b>Zasada testu</b>	Złoto koloidalne
<b>Rodzaj próbki</b>	Krew (z opuszka palca / z żyły), surowica i osocze.
<b>Ilość próbki</b>	10 $\mu$ L
<b>Czas testu</b>	15 minut
<b>Temperatura pracy</b>	18-25°C
<b>Temperatura przechowywania</b>	2-13°C

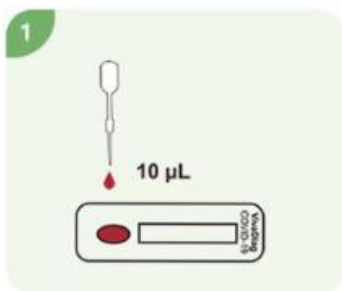

1. Dodaj 10  $\mu$ L próbki

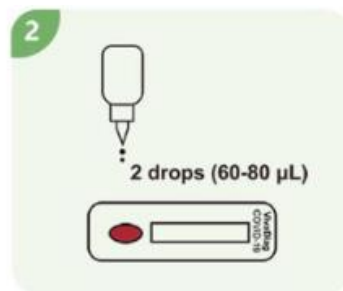

2. Dodaj dwie krople płynu buforowego

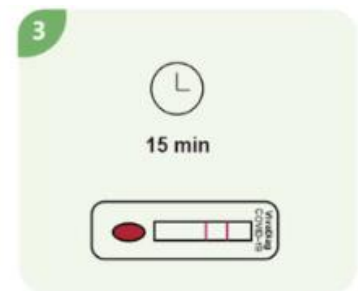

3. Przeczytaj wynik po 15 minutach.  
Nie czytaj wyniku po 20 minutach.

